

CUIDADOS ESPECIAIS

- Este produto não deve ser utilizado por pessoas (ou crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas por alguém responsável por sua segurança.
- Só use o massageador uma hora após as refeições.
- Se sentir tontura, náusea, dor no peito ou qualquer outro sintoma anormal, interrompa o uso do massageador imediatamente e consulte seu médico.
- Não use o aparelho em qualquer área do corpo que esteja anestesiada ou privada de sensações de calor ou dor, a não ser que seja autorizado pelo seu médico.

GARANTIA

1. Este produto está garantido por 12 meses a partir da data de aquisição e sua garantia só terá validade mediante a APRESENTAÇÃO DO CUPOM FISCAL onde indicará o nome do comprador, a data da compra e o estabelecimento comercial que vendeu o produto e, sempre que solicitado serviço de garantia, o consumidor deverá apresentar cupom fiscal.
2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.
3. A garantia é somente válida nos locais onde este produto é oficialmente comercializado.
4. O produto será consertado no período de garantia dentro de 30 dias contados da data do recebimento do aparelho.
5. Nossa empresa se reserva o direito de substituir o aparelho defeituoso por outro novo, caso julgue necessário.
6. Todos os reparos efetuados dentro do período de garantia não prorrogam o prazo da mesma.
7. Após o prazo de garantia serão mantidas peças e assistência técnica por 5 anos para execução de serviços pagos pelo usuário.
8. Todo serviço de manutenção e desgaste de peças por uso indevido, mesmo durante a garantia, será cobrado à parte.
9. Esta garantia e assistência técnica estão limitadas somente ao território nacional (Brasil).
10. Perde a garantia o aparelho que for indevidamente usado, ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivo, sofrer danos provocados por queda, etc. Defeitos ou danos causados por mau uso ou abuso estão excluídos desta garantia.
11. Se o aparelho não estiver funcionando adequadamente, verifique a voltagem da tomada antes de enviar para conserto.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)

2ª a 5ª feira: 08:00 – 18:00 / 6ª feira: 08:00 – 17:00
 São Paulo e Grande São Paulo: tel: 11 3813-1092
 Outras localidades: 0800 555 750
 Site: www.techline.com.br
 Outros países: favor contatar o distribuidor local

A Assistência Técnica é centralizada na cidade de São Paulo, sendo certo que todo produto que apresentar defeito dentro do período de garantia deverá ser enviado para conserto via Correio. O Sedex de ida será reembolsado ao consumidor na ocasião do retorno do aparelho através de vale postal. O consumidor receberá o aparelho consertado pela mesma via com frete pago pela Techline.

techline®

SAC (11)3813.1092 / 0800.555.750

Manual de Instruções
TONER MASSAGER
 Mod. MS-9000



Obrigado por adquirir um produto TECHLINE
Leia com atenção as instruções antes de usar o massageador
e mantenha este manual para futuras consultas

Quando usar um produto elétrico, algumas precauções básicas devem ser sempre seguidas para reduzir o risco de choque elétrico e poder usufruir de todos os benefícios deste produto.

(1) Antes de utilizar o massageador, consulte seu médico para melhor orientação. Este aparelho não deve ser usado por portadores de moléstias graves ou degenerativas, marca-passos e gestantes.

(2) Desligue sempre o produto da corrente elétrica imediatamente após o uso, antes de limpá-lo ou quando colocar os acessórios.

(3) Não use este aparelho durante o banho.

(4) Mantenha este produto afastado da água. Se o produto cair na água, desligue-o imediatamente da corrente elétrica. Esgote completamente a água e pegue o massageador com uma toalha seca. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente.

(5) Nunca deixe o aparelho ligado sem estar por perto.

(6) O uso do massageador por crianças ou pessoas debilitadas deverá ser supervisionado por um adulto.

(7) Nunca use o aparelho se o cabo elétrico estiver danificado. Mantenha o cabo elétrico e o aparelho longe de áreas quentes. Se o cabo elétrico estiver danificado, devolva o produto para nossa assistência técnica para verificação e reparos.

(8) Não durma utilizando o produto.

(9) Não use o aparelho se estiver usando produtos com aerossol ou onde oxigênio esteja sendo usado.

(10) Não use o aparelho na região dos olhos ou outras áreas muito sensíveis.

(11) Não use o aparelho debaixo de cobertores ou travessieiros para evitar superaquecimento que pode causar incêndio, choque elétrico, etc.

(12) Carregue o aparelho sempre pelo cabo e nunca pelo fio.

(13) Para desligar o aparelho, aperte o botão  e somente depois disso retire o fio da tomada.

(14) Use este aparelho seguindo estas instruções e utilize somente os acessórios aqui indicados.

(15) Este produto é de uso pessoal, sem fins terapêuticos e não sujeito a registro na ANVISA.

(16) Não use o aparelho em partes queimadas ou inchadas do corpo, com erupções na pele e em pernas com veias varicosas.

(17) Não utilize o aparelho por mais de 20 minutos cada vez. Para maior durabilidade do produto deixe-o descansar por outros 20 minutos antes de reiniciar o uso.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: MS-9000

Consumo de energia elétrica: Max. 25W

Voltagem: 110V ou 220V

Peso: 1.0 Kg

Material: ABS

APRESENTAÇÃO

Portátil e prático, este aparelho é um grande auxiliar para relaxamento do corpo através de seu movimento orbital e de poderosa vibração. Massageia e libera as tensões do corpo.

Com um giro máximo de 2500 rotações por minuto e 5 acessórios, sua utilização é prática, em qualquer lugar, garantindo sua privacidade e conforto.

PARTES E FUNÇÕES



ACESSÓRIOS:



MODO DE USAR


(1)- Para colocar ou substituir os acessórios

A. Remova a tampa com rede protetora (fig. 1)


B. Posicionando os dedos nos encaixes da base giratória, retire o acessório existente (fig. 2)

C. Coloque outro acessório e a tampa com rede protetora, se julgar necessário.

(2) Sempre verifique se a tensão é compatível com a voltagem do seu massageador (110V ou 220V) e somente depois disto pode ligá-lo à tomada.

(3)-Ligue o botão  para iniciar a vibração do massageador e escolha a velocidade desejada, apertando o botão “+” para aumentar a velocidade e “-” para diminuir. Aperte o botão AUTO para desenvolver os ciclos de massagem diferentes.

(4) Dependendo da sua conveniência, há duas maneiras de segurar o aparelho: pela parte central ou pelo cabo, conforme as figuras 3 e 4.

(5)- Quando terminar a utilização do massageador, para desligar, aperte o botão  e depois retire o cabo elétrico da tomada.

SUGESTÕES DE USO

Braços – para relaxar os músculos cansados

Ombros – para aliviar a tensão nos ombros e nas costas

Abdome – para definir e esculpir seu abdome

Quadris – para massagear e relaxar os quadris

Coxas – para aliviar a tensão

Panturrilhas – para relaxar os músculos cansados e doloridos

Pés – para relaxar e com o uso da lixa para remover calosidades e pele seca.

⚠ ATENÇÃO

→ Não utilize o massageador sem a tampa com a rede protetora em áreas determinadas do seu corpo pois o cabelo pode se enroscar no eixo giratório: pescoço, ombros, etc.

→ A tampa com a rede protetora só poderá ser usada com os acessórios massageadores ondulado ou plano. Não a use com os outros acessórios.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

(1) Use um pano macio e úmido. Não use produtos abrasivos nem solventes ou fortes detergentes. Nunca mergulhe o massageador em nenhum tipo de líquido.

(2) Mantenha seu TONER MASSAGER em local seguro, seco e em temperatura amena quando não estiver sendo usado.

(3) Não tente abrir para consertar este aparelho. Isto será motivo de perda da garantia. Contate nossa Assistência Técnica.

